


FlowflexTM

SARS-CoV-2

Antigenschnelltest (Selbsttest)



Schnelltest für den Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen in nasalen Proben. Zum Selbsttest.

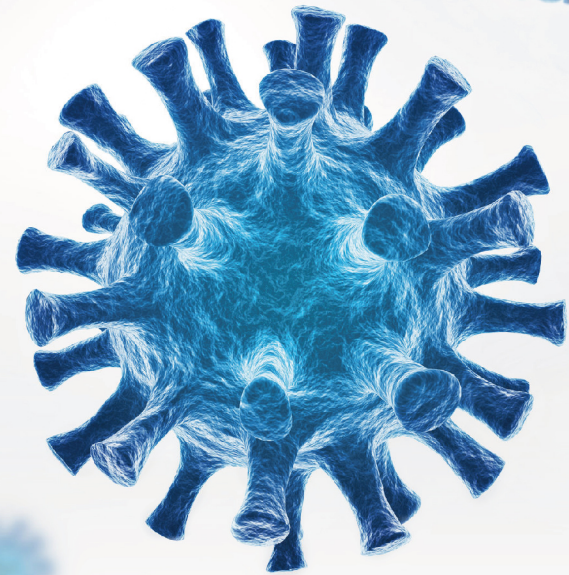

Der Weltmarktführer für Schnelltests mit **26** Jahren Erfahrung.



Schnell



Genauig



Benutzerfreundlich



Zuverlässig

Flowflex SARS-CoV-Antigenschnelltest (Selbsttest)

Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest ist ein Lateral-Flow-Test für den qualitativen Nachweis des Nukleokapsidprotein-Antigens von SARS-CoV-2 in Nasenabstrichproben direkt von Personen mit Verdacht auf COVID-19 innerhalb der ersten sieben Tage nach Auftreten der Symptome. Der Test kann auch Proben von Personen ohne Symptome untersuchen.

- **Probe:** Nasenabstrichprobe
- **Testzeit:** Testergebnisse in 15 Minuten
- **Haltbarkeit:** 24 Monate
- **Lagertemperatur:** 2-30°C
- **Genauigkeit:** 98.8%
- **Sensitivität:** 97.1%
- **Spezifität:** 99.5%


TESTVORGANG

1. Test-Vorbereitung

A. Öffnen Sie das Testkit:




B. Sie sollten haben:

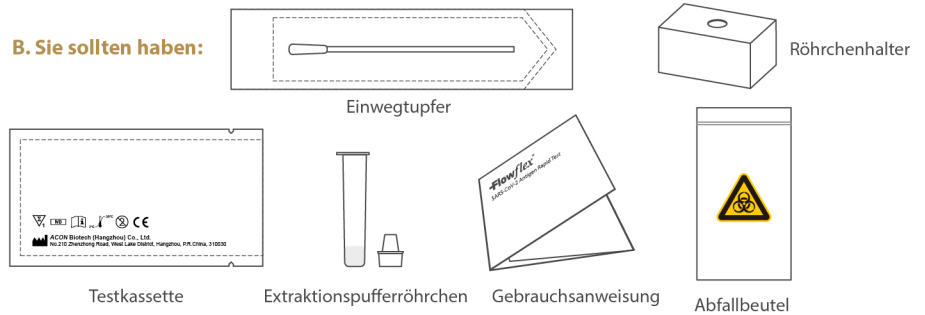


2. PROBENENTNAHME


ENTNAHME DURCH EINE ERWACHSENE BETREUUNGSPERSON

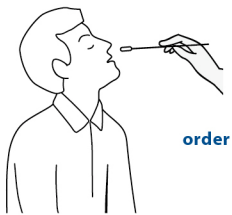


SELBSTENTNAHME

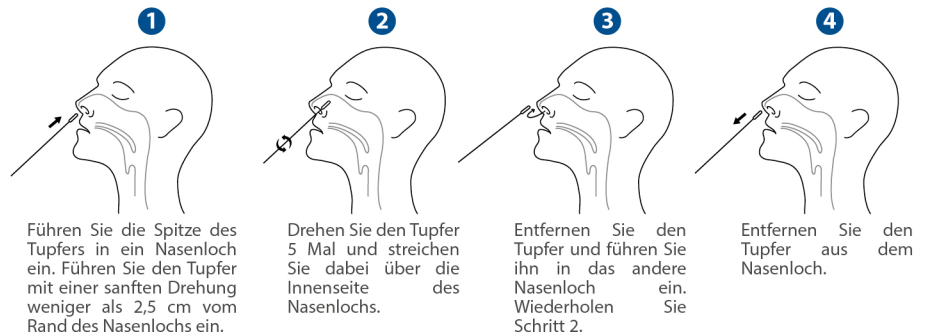

3. Probenvorbereitung

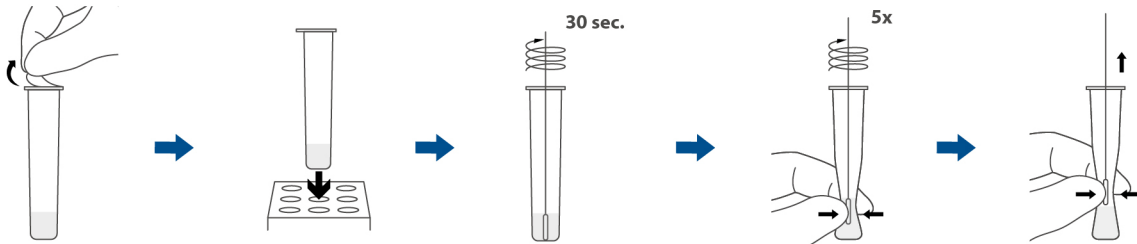

4. Test durchführen

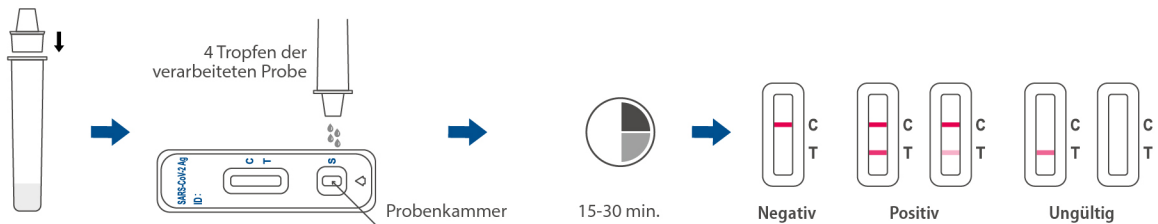

Bestellangaben

Produktname	Katalognummer	Format	Probe	Packung
Flowflex SARS-CoV-2 Antigenschnelltest (Selbsttest)	L031-11855	Kassette	nasalen Proben	1 Test / Kit 20 Kits / Box
	L031-118A5	Kassette	nasalen Proben	5 Tests / Kit



ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
 No.210 Zhenzhong Road, West Lake District, Hangzhou, P.R.China, 310030
 Telefon: +86-571-8118 9706 / Telefax: +86-571-8777 5781 / E-Mail: information@aconlab.com.cn
www.aconbio.com